

CeruShield-vahasuojan käyttöohje

Vahasuojan tehtävä on suojata kuulokojetta korvasta erittyvältä korvavahalta ja kosteudelta. Vahasuojan vaihto on tärkein käyttäjän itse tekemä kuulokojeen hoitotoimenpide.

Vaihtoväli riippuu siitä kuinka paljon korvavahaa erittyy, ja sen vuoksi yleispätevää ohjetta vaihtovälistä on hankala antaa. Älä koskaan käytä kuulokojetta ilman vahasuojaa!

Vaihda vahasuoja viimeistään jos huomaat, että:

- kojeen ääni on vaimeampi kuin aikaisemmin,
- ääni on vääristynyt tai
- vahasuoja on likainen.



- 1 Käännä kiekkoa niin, että roskakorin kohdassa on tyhjä aukko ja uusi valkoinen vahasuoja näkyy vahasuojakiekon kohdassa 2.
- 2– 3 Paina kuuloke kohtisuoraan roskakorin aukkoon niin, että kuulokkeessa tuntuu napsahdus. Vedä kuuloke varovasti kohtisuoraan ulospäin vahasuojakiekosta.
- 4–5 Paina kuuloke kohtisuoraan vahasuojakiekon aukkoon 2 niin, että kuulokkeessa tuntuu napsahdus.
- 6 Vedä kuuloke varovasti kohtisuoraan ulospäin vahasuojakiekosta.

Sonova Finland Oy

Tullikatu 6, 33100 Tampere
phonak-kauppa.fi , info@phonak.fi,
www.phonak.fi , 010 281 4477