

D-Dry+ elektronisen kuivaimen käyttöohje

- 1 – 2 Kytke virtajohdon toinen pää kuivaimen ja toinen pistorasiaan. Irrota korvakappale ja kuulokoje toisistaan.
- 3 Pyyhi korvakappaletta nihkeällä liinalla tai paperilla.
- 4 Ota paristo pois kuulokojeesta.
- 5 Aseta korvakappale ja kuulokoje kuivaimen ja käynnistä laite.
- 6 – 7 Kuivain tekee UV-puhdistuksen ja kuivauksen automaattisesti.
- 8 Kuivaus on päättynyt, kun kaikki valot ovat sammuneet.
- 9 Laita paristo takaisin kuulokojeeseen.
- 10 Sammuta laite painamalla käynnistyspainiketta 3 sekuntia.

