


## HF3 ja HF4 –vahasuojien käyttöohje

Vahasuojan tehtävä on suojata kuulokojetta korvasta erittyvältä korvavahalta ja kosteudelta. Vahasuojan vaihto on tärkein käyttäjän itse tekemä kuulokojeen hoitotoimenpide.

Vaihtoväli riippuu siitä kuinka paljon korvavahaa erittyy, ja sen vuoksi yleispätevää ohjetta vaihtovälistä on hankala antaa. Älä koskaan käytä kuulokojetta ilman vahasuojaa!

Vaihda vahasuoja viimeistään jos huomaat, että:

- kojeen ääni on vaimeampi kuin aikaisemmin,
- ääni on vääristynyt tai
- vahasuoja on likainen.

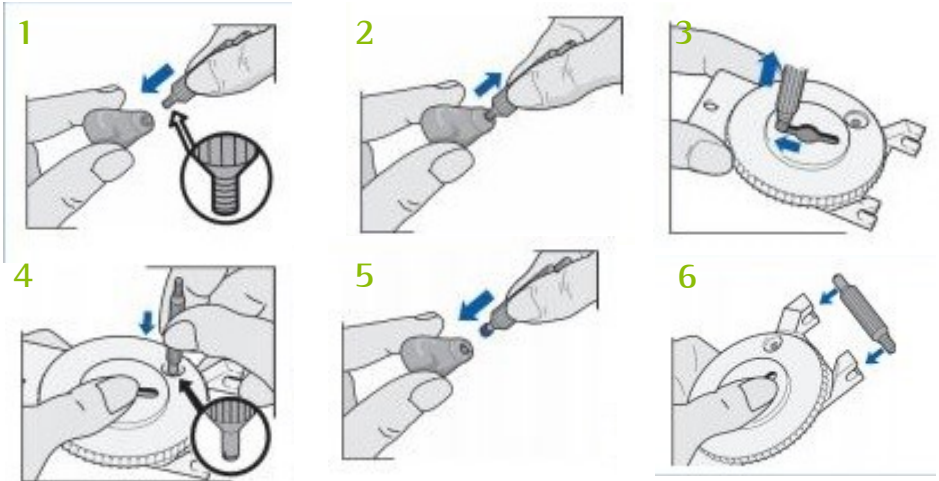

- 1– 2 Kierrä vaihtotyökalun kierteinen pää kuulokojessa olevaan vahasuojaan ja vedä vanha vahasuoja varovasti suoraan ulospäin kuulokojeen ääniaukosta.
- 3 Poista vanha vahasuoja työkalusta vahasuojakiekkon keskiaukon avulla.
- 4 Käännä vahasuojakiekkoa niin, että kiekon aukossa on uusi vahasuoja ja aseta vaihtotyökalun sileämpi pää aukkoon niin, että vahasuoja jää työkaluun kiinni.
- 5– 6 Paina vahasuoja kevyesti paikalleen kuulokojeseen ja vedä työkalu pois. Säilytä vaihtotyökalua vahasuojakiekkossa.

### Sonova Finland Oy

Tullikatu 6, 33100 Tampere  
phonak-kauppa.fi , info@phonak.fi,  
www.phonak.fi , 010 281 4477