

## Kuivaussarja (Cleansing and Care kit)

Suosittellemme kojeen kuivaamista vähintään kerran viikossa yön ajan. Kuivausaika riippuu kojeen kosteudesta.

Ota kuivauskapseli pois paketista ja aseta se kuivauspurkin pohjalle. Aseta koje paristokotelo auki kuivauspurkkiin väliritilän päälle. Sulje kuivauspurkki tiiviisti kiinni.

Säilytä kuivauskapseli kuivauspurkin sisällä purkki suljettuna. Mikäli kuivauspurkki jää auki, kapseli imee kosteutta huoneilmasta ja kapselin käyttöaika lyhenee. Vaihda kapseli uuteen kun väri on muuttunut kullankeltaisesta lähes valkoiseksi.

Sarjan mukana tulevilla puhdistusliinoilla voi puhdistaa kojeen päällisin puolin rasvasta ja liasta. Puhdistuspuikko on tarkoitettu kuulokojeen korvakappaleen puhdistamiseen.