

**Kojeen puhdistus/kuivaus:**

1. Irroita kuivauskapseli levystä.
2. Varmista, että kuivauspurkki on täysin kuiva ja aseta kapseli purkin pohjalle. Aseta väliritilä paikoilleen.
3. Aseta kuulokoje, paristokotelo avoinna, väliritilän päälle ja sulje purkki. Anna kuivua yön yli.
4. Kuivaa koje viikoittain.  
Kapselin vaihtaessa väriä (vaaleaksi), vaihda kapseli uuteen.

**Korvakappaleen pesu:**

1. Irroita korvakappale kuulokojeesta.
2. Täytä astia (esim. Kertakäyttömuki) haalealla vedellä.
3. Aseta pesutabletti astian pohjalle. Aseta korvakappale astiaan.
4. Anna vaikuttaa vähintään 15 minuuttia ja enintään 8 tuntia.
5. Poista korvakappale astiasta, huuhtelee korvakappale ja poista siitä vesi ilmanpuhalluspumpulla.
6. Kiinnitä korvakappale kuulokojeeseen.

**Huom!** Vain korvakappaleen puhdistukseen. Kuulokojetta ei saa laittaa pesuastiaan.