


SmartGuard–vahasuojan käyttöohje

Vahasuojan tehtävä on suojata kuulokojetta korvasta erittyvältä korvavahalta ja kosteudelta. Vahasuojan vaihto on tärkein käyttäjän itse tekemä kuulokojeen hoitotoimenpide.

Vaihtoväli riippuu siitä kuinka paljon korvavahaa erittyy, ja sen vuoksi yleispätevää ohjetta vaihtovälistä on hankala antaa. Älä koskaan käytä kuulokojetta ilman vahasuojaa!

Vaihda vahasuoja viimeistään jos huomaat, että:

- kojeen ääni on vaimeampi kuin aikaisemmin,
- ääni on vääristynyt tai
- vahasuoja on likainen.

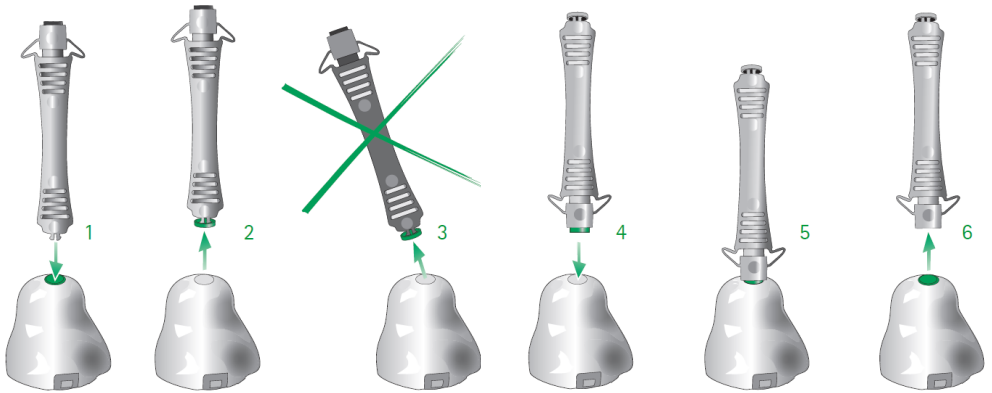

- 1 Aseta vaihtotyökalun tyhjä pää kuulokojeessa olevaan vahasuojaan.
- 2–3 Vedä vanha vahasuoja varovasti suoraan ulospäin kuulokojeen ääniaukosta.
- 4 Käännä vaihtotyökalu ja aseta uusi vahasuoja kuulokojeen ääniaukkoon.
- 5–6 Paina vahasuoja kevyesti paikalleen ja vedä työkalu pois.

Sonova Finland Oy

Tullinkatu 6, 33100 Tampere
phonak-kauppa.fi , info@phonak.fi,
www.phonak.fi , 010 281 4477